

HeelWedge - Trykaflastning Af Hælen



Indikationer

- Postoperativt efter indgreb ved hælsore
- Trykaflastning efter brud
- Trykaflastning af hælen
- Heling af ulcera omkring hælen (bagfodsulcera)

Produktinfo

HeelWedge er en tåsko til aflastning af hælområdet, den kan bl.a. anvendes efter behandling af diabetiske fodsår, post-operativt, efter korrektioner samt til aflastning af hælen.

Med HeelWedge flyttes vægten fra hælen frem til midt- og forfod, så hælområdet aflastes og hurtigere healing fremmes. Det kantede tåområde sikrer, at der er plads til eventuelle bandager. Lukningen over forfoden samt velcrostropperne gør det nemt at applicere og tilpasse skoene.

Det anbefales at anvende en TwinShoe, højdeudligningssko, til den anden fod for at forebygge kompensationskader. Du finder TwinShoe under relaterede produkter herunder eller under menupunktet Trykaflastningssko og såler.

Brugervejledning

- Åbn skoens velcrostropper
- Sæt foden i den åbne sko. Sørg for, at foden er placeret sikkert i skoene
- Luk skoene med velcrostropperne
- Foden må hverken sidde for stramt eller for løst i skoene
- Når du går, må afrulningen kun ske til den indre kant
- Afrulning til den yderste kant kan påvirke negativt
- HeelWedge må maksimalt anvendes i 6 uger

Vaskeanvisning

- HeelWedge kan tørres af med en fugtig klud, hvis den er let snavset eller renses med en blød børste
- Håndvask: HeelWedge kan vaskes i hånden med koldt vand og en let sæbeblanding og derefter tørre i luften
- HeelWedge må ikke tørres i en tørretumbler og heller ikke på radiatoren. Skoen skal tørre ved stuetemperatur

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
XS (33,5-37)	HeelWedge	1 stk	HW0B-ST
S (37,5-39,5)	HeelWedge	1 stk	HW1B-ST
M (40-41)	HeelWedge	1 stk	HW2B-ST
L (42-44)	HeelWedge	1 stk	HW3B-ST
XL (45-47)	HeelWedge	1 stk	HW4B-ST