

# MedSurg - Postoperativt, Stabilisering og Trykaflastning



## Indikationer

- Postoperativ til stabilisering og aflastning
- Alle former for sår.

## Tilbehør

Tåkappe kan tilkøbes, så MedSurg kan lukkes i tåen. Se referencenumre under sortiment.

PegAssist Insole eller Puzzle Insole kan erstatte indersålen for yderligere individuel tilpasning.

## Produktinfo

MedSurg post-operativsko sikrer stabilitet og aflaster den opererede fod mod stød og tryk. MedSurg har en let afrundet ydersål for- og bagtil, den er stødabsorberende og samtidig uflexibel med en kort kontaktflade til underlaget, hvilket sikrer optimal stabilitet og aflastning.

MedSurg har en rocker sål, der reducerer trykket under foden med op til 25%. Skoen er åben i tåen, men der kan tilkøbes en tåkappe. Sålens kantede tåområde, samt de lange velcrostropper sikrer, at skoen kan tilpasses større bandager.

Indersålen i MedSurg kan tages ud, så der er større mulighed for individuel tilpasning i forhold til trykaflastning/-fordeling. Der er også mulighed for at erstatte indersålen med en PegAssist Insole eller Puzzle Insole for yderligere individuel tilpasning.

## Brugervejledning

- Åbn skoens velcrostropper
- Foden skal sidde godt i skoen
- Tilpasning til venstre eller højre fod sker med velcrostropperne placering. Logoet skal være på fodens yderside
- Luk skoen med velcrostropperne

- Den øverste velcrostrop kan afkortes efter ønske

## Vaskeanvisning

- Medical Surgical kan tørres af med en fugtig klud, hvis den er let snavset eller renses med en blød børste
- Håndvask: Medical Surgical kan vaskes i hånden med koldt vand og en let sæbeblanding og derefter tørre i luften
- Medical Surgical må ikke tørres i en tørretumbler og heller ikke på radiatoren. Skoen skal tørre ved stuetemperatur

## Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
Dame, S (34-36,5)	Medical Surgical	1 stk	MSW1B-ST
Dame, M (37-38,5)	Medical Surgical	1 stk	MSW2B-ST
Dame, L (39-41)	Medical Surgical	1 stk	MSW3B-ST
Tåkappe, Dame, S (34-36,5)	Tåkappe til Medical Surgical	1 stk	TCW1
Tåkappe, Dame, M (37-38,5)	Tåkappe til Medical Surgical	1 stk	TCW2
Tåkappe, Dame, L (39-41)	Tåkappe til Medical Surgical	1 stk	TCW3
Herre, S (39-41)	Medical Surgical	1 stk	MSM1B-ST
Herre, M (41,5-43)	Medical Surgical	1 stk	MSM2B-ST
Herre, L (43,5-45)	Medical Surgical	1 stk	MSM3B-ST
Herre, XL (45-48)	Medical Surgical	1 stk	MSM4B-ST
Tåkappe, Herre, S (39-41)	Tåkappe til Medical Surgical	1 stk	TCM1
Tåkappe, Herre, M (41,5-43)	Tåkappe til Medical Surgical	1 stk	TCM2
Tåkappe, Herre, L (43,5-45)	Tåkappe til Medical Surgical	1 stk	TCM3
Tåkappe, Herre, XL (45-48)	Tåkappe til Medical Surgical	1 stk	TCM4