

Puzzle Insole - Modulopbygget Trykaflastningssål



Indikationer

- Lilletåmodul (smal)
 - Taylors bunion (lilletå)
 - Jones brud
- Storetåmodul (bred)
 - Arthrodese i MCP og storetåens grundled
 - Austin-, scarf- og akin-osteotomi
 - Closing- og opening-wedge
 - Skrå- og dome-osteotomi
 - Lapidus arthrodese (TMT1-arthrodese)
 - Youngswick osteotomi
- Mellemodul
 - Weil's og/eller Helal's osteotomi I – IV
 - Morton neurom
 - Hammertå korrektur
 - PIP-?/?DIP-arthrodese
 - Ossa metatarsale frakturer II – IV
 - Forkortelsesosteotomi af ossa metatarsalia II – IV (Puzzle-modulet når op til den proksimale ende af metatarsalia II – IV)

Produktinfo

Puzzle Insole er en modulopbygget trykaflastningssål med udskiftelige elementer. Puzzle Insole består af en hård sort sål og en blødere blå sål. Disse kombineres let og yder aflastning ved for- og midtfods operationer.

Ved at bytte om på modulerne kan patienten opnå den perfekte trykfordeling for hver enkelt indikation. Den 2,4 grader hældning af hælen giver større aflastning af forfoden. I det område af

foden, der har brug for aflastning, kan det sorte EVA modul (30 Shore) udskiftes med det blå EVA modul, der er blødere (9 Shore).

Med den modellerbare Puzzle Insole kan man opnå aflastning på op til 55%. Dette er resultatet af en måling sammenlignet med en almindelig sål og en Medical Surgical sko.

Puzzle Insole kan anvendes til vores Relief Dual og MedSurg Pro sko, se relaterede produkter herunder.

Brugervejledning

- Den sorte sål, 30 Shore, er bærermodul. Den blødere blå sål, 9 Shore, anvendes til en indikationsbaseret trykaflastning
- Sæt et blåt modul (smalt, bredt og/?/eller mellem) ind i den sorte bæresål, det sted trykaflastningen skal virke
- Tag den originale sål ud af skoen
- Læg den tilpassede Puzzle Insole ind i skoen

Vaskeanvisning

- Sålerne kan vaskes med lunkent vand og sæbe eller rengøres med et desinfektionsmiddel

Sortiment

| Størrelse | Indhold | Pakning | Ref. nr. |
|---------------------|---------------|---------|----------|
| Dame, S (34-36,5) | Puzzle Insole | 1 stk | PI-WS |
| Dame, M (37-38,5) | Puzzle Insole | 1 stk | PI-WM |
| Dame, L (39-41) | Puzzle Insole | 1 stk | PI-WL |
| Herre, S (39-41) | Puzzle Insole | 1 stk | PI-MS |
| Herre, M (41,5-43) | Puzzle Insole | 1 stk | PI-MM |
| Herre, L (43,5-45) | Puzzle Insole | 1 stk | PI-ML |
| Herre, XL (45,5-47) | Puzzle Insole | 1 stk | PI-MXL |