

Revamil Melginate - Sårbandage Med Honning



INDIKATIONER

- Eksuderende sår
- Liggesår
- Ulcus
- Inficerede sår
- Operationssår
- Strålingsfremkaldte onkologiske sår
- Mindre (1. og 2. grads) brandsår

Kontraindikationer:

- Må ikke anvendes hvis patienten er allergisk eller overfølsom over for honning eller alginat
- Må ikke anvendes på et tørt sår
- I tilfælde af uventede bivirkninger efter brug, kontages læge

Bivirkninger:

I de første minutter efter bandagen er lagt på såret, kan honning-imprægneret Revamil Melginate give en let sviende fornemmelse.

PRODUKTINFO

Revamil Melginate er en calciummalginat sårbandage, imprægneret med ren honning fremstillet under kontrollerede forhold. Den omhyggeligt kontrollerede proces sikrer, at Revamil Melginate

med honning ikke indeholder rester af pesticider samt at kvaliteten er konstant og kan reproduceres.

Revamils hydrofile egenskaber sikrer et fugtigt sårmiljø, som i kombination med honningens høje enzymaktivitet fremmer sårheling. Revamil Melginate kan bruges til behandling af eksuderende sår, herunder liggensår, forskellige typer ulcus, inficerede sår, operationssår og strålingsfremkaldte, onkologiske sår samt mindre (1. og 2. grads) brandsår.

Når Revamil Melginate bruges til eksuderende sår, dannes der en gel ved absorbering af sårvæske, som beskytter såret mod maceration. Alginatgelen dækker såret og opretholder et fugtigt sårmiljø. Gelen gør, at det er nemt at skifte forbindelse, fordi gelen ikke klæber til såret, og der bliver ingen rester siddende i såret.

100% ren honning

Honningen i vores Revamil produkter er 100% ren. Honningen indsamles fra bier i et landbrugsfrit miljø. I biavl og i de nærliggende landbrug bruges der ikke pesticider.

Før i tiden blev Revamil honning produceret i væksthuse. Det blev dog erfaret, at dette miljø ikke er ideelt for bierne, da de har brug for mere plads til at flyve. Der blev derfor søgt efter regioner i Holland, hvor bierne kan flyve frit og hvor der ikke bliver brugt pesticider - heller ikke i de nærliggende landbrug - samt hvor der er tilstrækkelig nektarkilder.

Kontrol af Revamil honning

Hvert parti Revamil honning kontrolleres for rester af tungmetaller og pesticider for at sikre, at forholdsreglerne, der er taget, er effektive.

Hvad er medicinsk honnings effekt i et sår?

Casestudier og kliniske undersøgelser har vist, at den antibakterielle virkning er Revamil honningens vigtigste rolle i sårhelingsprocessen. Den antibakterielle virkning skyldes først og fremmest honningens høje enzymindhold. I et fugtigt sårmiljø sikrer enzymet glukose oxidase en langsom og langvarig frigivelse af små mængder hydrogenperoxid. Herved dræbes bakterierne effektivt, uden at granulationsvævet angribes.

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
10 x 10 cm, 5 stk. i æske	5 stk.	1 æske	10350