



Revamil Hydrofil Sårgel - Medicinsk Honning



Indikationer

- Inficerede sår
- Dybe sår
- Kroniske sår
- Akutte sår

Produktinfo

Revamil hydrofil sårgel indeholder 100% ren medicinsk honning, den giver en effektiv og langvarig antibakteriel virkning. En langsom frigivelse af små mængder hydrogenperoxid gør Revamil hydrofil sårgel særlig velegnet til inficerede sår.

Revamils hydrofile egenskaber sikrer et fugtigt sår miljø, som i kombination med honningens høje enzymaktivitet fremmer sårheling. Revamil er særdeles velegnet til behandling af akutte, kroniske og inficerede sår i alle sår faser. Revamil er let at påføre, hænger ikke fast i såret og neutraliserer sårlugt.

Holdbarhed: 3 måneder efter åbning.

En tube indeholder 18 gr. strålesteriliseret honning.

100% ren honning

Honningen i vores Revamil produkter er 100% ren. Honningen indsamles fra bier i et landbrugsfrit miljø. I biavl og i de nærliggende landbrug bruges der ikke pesticider.

Før i tiden blev Revamil honning produceret i væksthuse. Det blev dog erfaret, at dette miljø ikke

er ideelt for bierne, da de har brug for mere plads til at flyve. Der blev derfor søgt efter regioner i Holland, hvor bierne kan flyve frit og hvor der ikke bliver brugt pesticider - heller ikke i de nærliggende landbrug - samt hvor der er tilstrækkelig nektarkilder.

Kontrol af Revamil honning

Hvert parti Revamil honning kontrolleres for rester af tungmetaller og pesticider for at sikre, at forholdsreglerne, der er taget, er effektive.

Hvad er medicinsk honnings effekt i et sår?

Casestudier og kliniske undersøgelser har vist, at den antibakterielle virkning er Revamil honningens vigtigste rolle i sårhelingsprocessen. Den antibakterielle virkning skyldes først og fremmest honningens høje enzymindhold. I et fugtigt sårmiljø sikrer enzymet glukose oxidase en langsom og langvarig frigivelse af små mængder hydrogenperoxid. Herved dræbes bakterierne effektivt, uden at granulationsvævet angribes.

Brugervejledning

- Rens og debrider såret efter behov
- Applicer et tyndt lag Revamil hydrofil sårgel direkte på såret eller anbring Revamil hydrofil sårgel på den sekundære bandage, som såret dækkes med
- Fikser sekundær bandage
- Gentag behandlingen med 1-3 dages interval

Holdbarhed: 3 måneder efter åbning.

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
1 tube à 18 gram	1 tube à 18 gram	1 stk	10100